




Step by Step

Dentin**Bond** Evo & Dentin**Build** Evo



www.kometdental.de

Entfernung der
Wurzelfüllung mit
Pilotbohrer
183LB.204.090,
☉_{opt.} 1.200 min⁻¹.

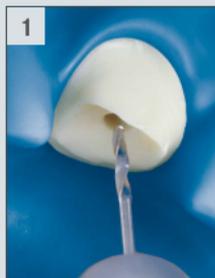


Stiftbettpräparation
mit Erweiterer
196.204.090,
☉_{opt.} 1.000 min⁻¹.



Passprobe mit einem
DentinPost Coated
(DPC) durchführen.
Ggf. den Stift mit einer
Diamantscheibe unter
Kühlung extraoral
kürzen.



Danach den DPC mit
medizinischem Alkohol
wischdesinfizieren
(getränktes Tuch, nicht
einlegen!)

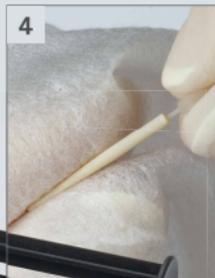

Manuelle mechanische
Konditionierung des
Kanals mit Aufrauinstru-
ment 196D.644.090.
Anschließend spülen.



Überschüssiges
Material mit Papier-
spitzen aus dem
Kanal entfernen.


DentinBond Evo –
Single Mix Kapsel
Mit blauer Applikati-
onsbürste senkrecht
durch **beide (auch die
innere) Aluminium-
folien** der Kapsel
stechen und die beiden
Komponenten ca.
10 Sek. vermischen.



Rest ca. 10 Sek. lang
mit leichtem, ölfreiem
Luftstrom verblasen.

Alternativ:

DentinBond Evo –
2-Flaschen-System
Einen Tropfen Dentin-
Bond Evo Part A
(schwarzer Deckel)
und einen Tropfen
Part B (blauer Deckel)
ca. 10 Sek. miteinan-
der vermischen.

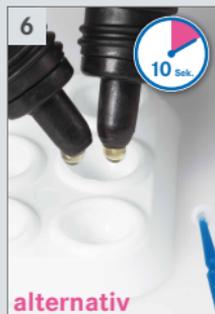

Mit einer Dental-
halogenlampe für
ca. 20 Sek. die
gebondete Zahnhart-
substanz lichthärten.
Es verbleibt eine
klebrige Schicht.

Mischung in reichlicher
Menge auf Zahnhart-
substanz (Schmelz und
Dentin, inkl. Kanal)
auftragen und ca.
30 Sek. lang intensiv
einarbeiten. Material
homogen über die
Fläche verteilen.



**DentinBuild Evo
Minimix-Spritze**
Bevor die Mischkanüle
auf die Minimix-Spritze
aufgesetzt wird, muss
die Füllhöhe der bei-
den Komponenten in
der Minimix-Spritze
überprüft werden:
Wenn der Stand nicht
gleich hoch ist, über-


schüssiges Material aus der Spritze drücken. Bis das Material gleichmäßig aus beiden Öffnungen fließt.



Durch seitliches Verdrehen um 90° wird die Mischkanüle fixiert. Die ersten 2 - 3 mm des austretenden Composites sollten verworfen werden.



DentinBuild Evo direkt auf den Wurzelstift aufbringen oder den Stift im Composite wälzen. Durch das Wälzen wird der Stift gleichmäßiger mit Composite benetzt.

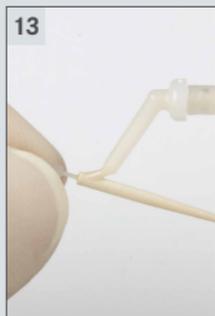

Stift mit geringem Druck und unter leicht drehender Bewegung in den Wurzelkanal einsetzen.



Für eine schnelle Stabilisierung des Stiftes den koronalen Teil ca. 20 Sek. mit einer Dentalhalogenlampe lichterhärten.



Das unbeschichtete Handlungsteil wird nach dem Einsetzen des Wurzelstiftes durch leichtes Verkanten abgeknickt.



Stumpfaufbau: Mit einer Dentalhalogenlampe den oberen Bereich für ca. 40 Sek. lichterhärten. Das Composite härtet innerhalb von ca. 3,5 Min. selbst aus.



Den erstellten Stumpfaufbau wie gewohnt präparieren und für die Aufnahme der endgültigen Restauration vorbereiten.

Produktauszug:



- 9972** DentinBond Evo
20 x Single Mix Kapseln
20 x Einweg-Applikations-
bürsten blau



- 9973** DentinBond Evo
2 x 5 ml Flaschen
50 x Einweg-Applikations-
bürsten blau



- 9970** DentinBuild Evo A2
2 x 5 ml/9g Minimix-Spritzen
10 x Mixing Tips
10 x Intra-oral Tips



- 9971** DentinBuild Evo opak Weiß
2 x 5 ml/9g Minimix-Spritzen
10 x Mixing Tips
10 x Intra-oral Tips

 **Hersteller/Manufacturer:**
P.L. Superior Dental Materials GmbH
22607 Hamburg · Germany